

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

# MyClean® DS

## Schnelldesinfektion



- Gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gem. RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

**Anwendung:** Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

**Ausführungen:** **MyClean® - DS Schnelldesinfektion**

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	1L	79610	4046153116102	10305723	12
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	5L	79611	4046153116126	10305746	2
Schnelldesinfektion / rapid desinfection	Neutral / neutral	10L	79612	4046153116140	10305752	1

**Einwirkzeiten:**

Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und levurozid	konz. - 1 Min.
TBC ( M. terrae )	konz. - 1 Min.
BVDV / (HCV)- Inaktivierung	konz. - 30 Sek.
Vaccinia	konz. - 30 Sek.
Rota - Viren	konz. - 30 Sek.
Noro - Viren (MNV)	konz. - 5 Min.

**Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43g Ethanol, 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid


**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG / VAH / HACCP  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**Verwendbarkeit:** ⏳ 3 Jahre

**Symbole:**



Gefahr

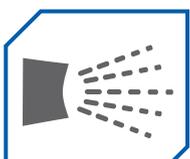

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-20140901